

Gebrauchsanweisung

Bitte lesen Sie diese Information sorgfältig – sie wird Ihnen helfen, das Gel richtig anzuwenden.

Visco-Vision® Gel

0,2% Carbomer

Benetzendes, hochviskoses Gel zur Anwendung am Auge – langanhaltend und wohltuend.

Was ist Visco-Vision® Gel?

Visco-Vision® Gel ist ein viskoses, hypotones Benetzungsgel mit 0,2% Carbomer 980. Visco-Vision® Gel weist hervorragende muko-adhäsive Eigenschaften auf. Durch seine gleichmäßige Benetzung der Hornhaut- und Bindehautoberfläche wird das Auge langanhaltend und wohltuend befeuchtet.

Zusammensetzung:

Carbomer 980 (0,2%), Sorbit, Natriumhydroxid, Dinatriumedetat, Cetrimid (0,01%) und gereinigtes Wasser.

Visco-Vision® Gel kann bei den folgenden Indikationen verwendet werden:

Visco-Vision® Gel dient als Benetzungsgel zur Anwendung bei trockenen Augen, Fremdkörpergefühl und visuellem Stress.

Mit Visco-Vision® Gel kann eine langanhaltende Erleichterung bei Beschwerden erzielt werden, die z. B. durch:

- trockene Augen, die durch das Sjögren Syndrom verursacht werden,
- mechanische Beanspruchung, z. B. nach diagnostischen Eingriffen am Auge,
- Umweltstress, z. B. durch klimatisierte Räume, Wind, Kälte, trockene oder schadstoffhaltige Luft, wie beispielsweise durch Zigarettenrauch oder
- Müdigkeit und Sehstress durch intensives Sehen, z. B. an Computerbildschirmen, Mikroskopen oder langen Autofahrten verursacht werden.

Wann sollte man Visco-Vision® Gel nicht anwenden?

- Bei einer bestehenden Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber einem der Inhaltsstoffe.

Für wen ist Visco-Vision® Gel geeignet?

Geeignet zur Anwendung bei Jugendlichen und Erwachsenen ab 18 Jahren.

Für Schwangere, stillende Frauen und Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren liegen keine klinischen Daten vor. Diese Patientengruppen sollten vor der Anwendung von Visco-Vision® Gel Ihren behandelnden Arzt konsultieren.

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Visco-Vision® Gel auftreten?

Die folgenden Nebenwirkungen wurden bei der Anwendung von Visco-Vision® Gel gelegentlich beobachtet:

- Nach der Anwendung kann vorübergehend eine Beeinträchtigung der Sehschärfe (Schleiersehen) eintreten. In diesem Fall sollte kein Fahrzeug gelenkt und keine Maschinen bedient werden. Es empfiehlt sich zu warten, bis die normale Sehschärfe wieder eingetreten ist.
- Unmittelbar nach der Applikation können Symptome, wie leichtes vorübergehendes Brennen der Augen oder Klebrigkeit der Augenlider auftreten.

Sollten Sie Nebenwirkungen bemerken, die hier nicht beschrieben sind, informieren Sie bitte Ihren behandelnden Arzt.

Welche Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise sind zu beachten?

- Nicht verwenden, wenn die Tube oder der Sicherheitsverschluss beschädigt ist.
- Das Auge mit der Tubenspitze nicht berühren, um Infektionen oder Verletzungen des Auges zu vermeiden.
- Die Tubenspitze darf nicht mit anderen Gegenständen oder Körperteilen berührt werden um eine bakterielle Verunreinigung des Gels zu vermeiden.
- Bitte entfernen Sie vor der Anwendung die Kontaktlinsen und setzen Sie diese mit einem zeitlichen Abstand von mindestens 30 Minuten wieder ein.
- Verwenden Sie Visco-Vision® Gel nicht nach Ablauf des Verfallsdatums. Dieses wird auf dem Tubenfalz sowie der Faltschachtel angegeben.
- Dieselbe Tube Visco-Vision® Gel darf aus Hygienegründen nicht von mehreren Patienten benutzt werden.
- Wenn die Augenbeschwerden während der Anwendung von Visco-Vision® Gel andauern oder nach dem Absetzen erneut auftreten, konsultieren Sie bitte Ihren Augenarzt.
- Visco-Vision® Gel ist nicht zur alleinigen Behandlung einer Augeninfektion geeignet. Bitte konsultieren Sie bei Verdacht auf eine Augeninfektion Ihren Augenarzt.

Wie wird Visco-Vision® Gel angewendet?

Nur für den äußerlichen Gebrauch.

Wenden Sie Visco-Vision® Gel wie in den Abbildungen 1 – 3 gezeigt an.

Waschen Sie Ihre Hände gründlich, bevor Sie Visco-Vision® Gel anwenden. Zum Öffnen den Schraubverschluss entgegen den Uhrzeigersinn bis zum Brechen des Sicherheitsverschlusses drehen. Bitte entfernen Sie den Sicherheitsring nach dem erstmaligen Öffnen der Tube.

Schritt 1:




Legen Sie den Kopf etwas zurück (Nackenposition) und ziehen Sie das Unterlid mit der freien Hand leicht vom Auge ab.

Schritt 2:

Halten Sie die Tube senkrecht, mit der Öffnung nach unten, über das Auge. Drücken Sie nun leicht auf die Tube bis sich an der Tubenspitze ein kleiner Tropfen bildet. Bringen Sie den Tropfen in den Bindehautsack des betroffenen Auges ein, ohne das Auge mit der Tubenspitze zu berühren.

Schritt 3:

Blinzeln sie zwei oder drei mal, um das Gel gleichmäßig über das Auge zu verteilen. Nach Benutzung die Tube mit der Schutzkappe wieder verschließen. Achten Sie dabei sorgfältig darauf, dass Sie mit der Tubenspitze nichts berühren (auch nicht Ihre Finger). Ein Knicken oder Aufrollen der Tube sollte vermieden werden, um die Tube nicht zu beschädigen.

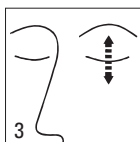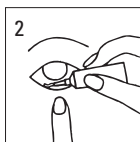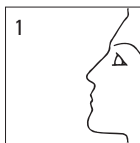

Wie oft und wie lange sollte man Visco-Vision® Gel anwenden?

Wenden Sie Visco-Vision® Gel nach Bedarf oder nach Anweisung des Augenarztes an. Im Allgemeinen tropfen Erwachsene und Jugendliche 3- bis 4-mal täglich 1 Tropfen des Gels in den Bindehautsack ein. Visco-Vision® Gel ist für eine Daueranwendung geeignet. Allerdings sollten Sie – wie bei allen anderen Erkrankungen – bei länger anhaltenden Beschwerden einen Augenarzt um Rat fragen. Im Falle einer zusätzlichen lokalen Behandlung der Augen sollte zwischen den beiden Anwendungen ein zeitlicher Abstand von ca. 30 Minuten bestehen. Visco-Vision® Gel sollte **nach** den anderen Produkten appliziert werden.

Folgende Packungsgrößen sind erhältlich:

Augengel in 10 g und in 3 x 10 g Tuben.

Welche Hinweise zur Lagerung und Entsorgung sind zu beachten?

Bei 5 °C bis 25°C lagern. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Bewahren Sie Visco-Vision® Gel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Angaben zur Lotnummer und zum Verfallsdatum finden Sie auf dem Tubenfalz sowie der Faltschachtel.

Nach dem erstmaligen Öffnen ist Visco-Vision® Gel für 30 Tage verwendbar.





Visco-Vision® Gel kann im Hausmüll entsorgt werden.




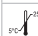
Stand der Gebrauchsinformation: April 2020

 **Hersteller:**
OmniVision GmbH
Lindberghstraße 9
82178 Puchheim, Deutschland
Tel.: +49 89 84 07 92 30
Fax: +49 89 84 07 92 40
www.omnivision.de
E-Mail: info@omnivision.de

 0123

Vertrieb Österreich:
OmniVision GmbH
Anton Anderer Platz 6
1210 Wien, Österreich
Tel.: +43 1 270 70 70
Fax: +43 1 270 70 20
www.omnivision.at
E-Mail: info@omnivision.at

	Hersteller
	Vor Sonnenlicht schützen, vor Hitze schützen
	Sterilisiert mit aseptischen Verfahren
	Gebrauchsanweisung beachten

	Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden
	Fertigungslosnummer, Charge
	Verwendbar bis
	Temperaturbegrenzung

04/2020



OmniVision GmbH, Lindberghstraße 9, 82178 Puchheim, Deutschland
E-Mail: info@omnivision.de